



## 福祉用具詳細

[前の検索結果へ](#)

[福祉用具一覧へ戻る](#)

### 介護保険:福祉用具貸与(歩行補助つえ)

※アイコンをクリックすると同一介護保険適用商品が検索できます。

▶商品名	階段アシスト杖 Stair Assist Cane (SAC)	
▶製品型番	SAC03	
▶TAISコード	02071 - 000002	
▶JISコード		
▶ISOコード		
▶分類	[1]120318:四脚杖	<a href="#">同じ分類で検索</a>
	[2]120603:歩行器	<a href="#">同じ分類で検索</a>
▶発売年月	令和3年5月	
▶カラー		
▶希望小売価格	¥13,545	



### 厚生労働省が取り組む福祉用具貸与価格情報公開に基づく価格情報

▶最頻価格	価格データなし
▶平均価格	価格データなし
<p>※「最頻価格」及び「平均価格」は、令和4年6月の介護保険利用分から算出したものです。</p> <p>※この情報は介護給付適正化システムから抽出したものです。</p> <p>※貸与価格は同一製品であっても、取り扱う福祉用具貸与事業者のサービス内容(アセスメント、用具の選定、計画書作成、搬出入、モニタリング、メンテナンス、消毒等)に係る費用によって異なります。</p> <p>◎価格情報の取り扱いについて(必ずお読みください。)</p>	

▶サイズ	本体:幅365×奥行215×高さ963~1105mm(12段階※追加で各段階の微調整が可能) グリップ:直径30mm
▶重量	1.1kg
▶材質	本体:アルミニウム合金 グリップ:PUI(ISO10993-5)
▶耐荷重	136kg
▶推奨ユーザー身長	145~177cm
▶階段の使用条件	①階段の蹴上(高さ):300mm以下 ②階段の踏み面:185mm以上※蹴込部分除く
▶概要 および特徴	階段アシスト杖(SAC)は、階段の上り下りをアシストする専用の杖~動く手すり~です。人間工学に基づいた設計で、4本の足が階段の段差にフィット。上下に直径3cmの持ち手があり、上り下りの姿勢に応じて握りやすくなっています。また高さ調節ボタンにより、足の長さを12段階で調整することができ、様々な階段に適應させることが可能です。軽量かつ丈夫な設計で136 kgの重量に耐えることができます。
▶使用上の注意	段差に杖を置き、高さ調整押しボタンと回転部品にて、上段と下段で適切な高さになるように調節してください。高齢者の方が使用される場合、正しい操作方法に慣れるまでは周囲の方のサポートの上で使用してください。
▶PDFファイル	<a href="#">階段アシスト杖パンフレット</a>
▶動画	<a href="#">動画サイト</a>
▶関連サイト	<a href="#">階段アシスト杖</a>

## 問い合わせ先

▶メーカー名	プレミアムラボ
▶担当部課	
▶住所	奈良県葛城市南道穂42番地2
▶TEL	0745-69-2235
▶FAX	0745-69-4664
▶MAIL	<a href="mailto:info@premium-lab.net">info@premium-lab.net</a>
▶ホームページ	<a href="https://www.premium-lab.net/">https://www.premium-lab.net/</a>

[前の検索結果へ](#)

[福祉用具一覧へ戻る](#)