


RSC（歩行アシスト杖）

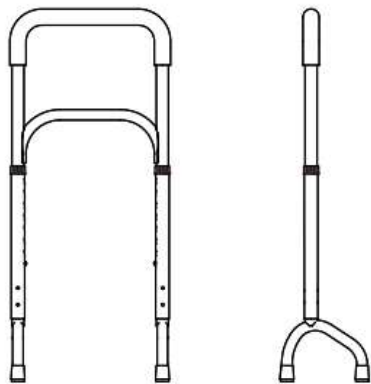

お問い合わせ

製造元会社名: Orange Living Co., Ltd.
 日本総代理店: Premium Lab(プレミアムラボ)
 住所: 奈良県葛城市南道穂42番地2
 電話番号: 0745-69-2235
 ※電話がつながりにくい場合がございますので、
 メールにてご連絡ください。
 メールアドレス: info@premium-lab.net
 営業時間: 9:00~17:00(土日祝除く)

寸法: 335×190×745-897mm
 推奨ユーザー身長: 145~175mm
 製品重量: 1.1kg
 高さ調整可能 7段階
 耐荷重: 136kg
 本体素材: アルミニウム合金



製品パーツ

箱の中には、下記のパーツが入っています。

- A : 本体部分
- B : 杖の脚
- C : 杖の脚
- D : 回転部品

組み立て方法

1. DがBとCの上部にあることを確認し、Aの両サイドにBとCを挿入します。
2. BとCの脚の穴がお互いに向き合っていることを確認し、高さ調整押しボタンを押します。
3. 身長に合うように高さ調整押しボタンの位置を合わせます。その際、ボタンの飛び出している位置がBとCで互いに平行になっているかを確認します。
4. 最後にDを締めて、組み立てが完了です。

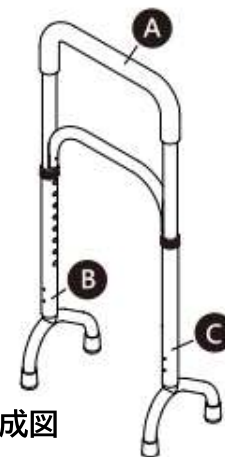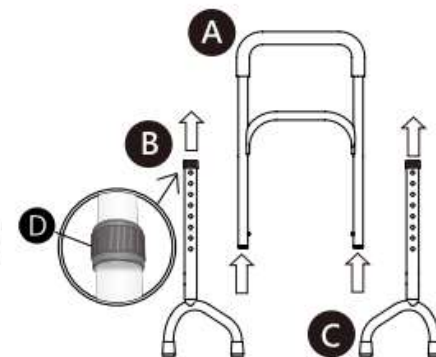


組み立て完成図

使用前の準備・調整

使用するのに適した高さは、(利用者の身長÷2) + 2cm が目安となります。
 杖を使うときは、杖を体の前に20cm離し、肘の角度は30~40度くらいにします。


参考: 利用者の身長(cm)と杖の高さNo.対応表

杖の高さNo.	1	2	3	4	5	6	7
適切な身長	152-154	155-158	159-162	163-166	167-170	171-173	174-175

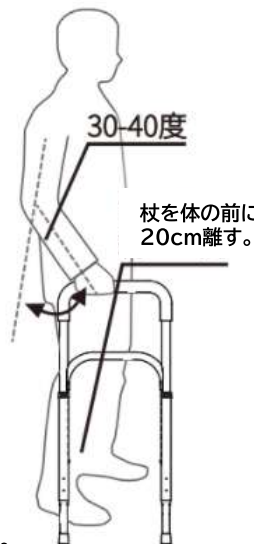

杖の高さや肘の角度は目安となりますので、ご利用者様のお体に合わせてご利用ください。

使用位置

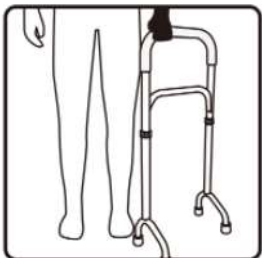

歩くとき

1. ハンドルをしっかり握る。
2. 杖で体を支えながら、ゆっくりと歩きます。



座った状態から立つとき

1. RSCを体の前に置く。
2. ハンドルを握って体重を支える。
3. 押し下げながらゆっくりと立ち上がる。



車での使用


1. ドアが開いたら、RSCを地面に置く。
2. ハンドルを握って体重を支える。
3. ゆっくりと体を移動させる。

メンテナンスと注意

- お体の状態に合わせて、医師、理学療法士、専門家等に相談の上ご利用ください。
- 杖を使用する前に、高さ調節押しボタンが杖にしっかりと固定されていることを確認してください。
- 高さ調節押しボタンが使用できなくなったり、緩んだり、壊れた際は、検査とメンテナンスのために日本総代理店に連絡してください。
- 利用者がきちんとした場所を歩いていることを確認すること。また薄暗い場所や滑りやすい場所での杖の使用は避けてください。
- 用途以外(例:登山用、トレッキングポール、護身用など)には使用しないこと。
- 使用前に、ゴムやネジが変形していないか、壊れていないかを確認し、壊れている場合は、安全性を保つために新しいものと交換が必要です。
- 杖で強い打撃(コンクリートをたたくなど)を与えないでください。
- 杖先ゴムは消耗品です。杖先ゴムの耐久度は、利用者、歩行条件、床面・路面等により変化します。磨耗して底面の溝が浅くなったり、割れ・欠けが発生している場合は、正しいサイズの新しい杖先ゴムと交換してください。杖先ゴムの交換は4個同時に交換してください。(杖先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。4個同時に交換しないとガタつきの原因となります。)
- 杖は涼しくて乾燥した場所に置いてください。ストーブのそばや強い日差しの下にある車の中など、高温の環境に置くことはさけてください。

P.2

使用方法

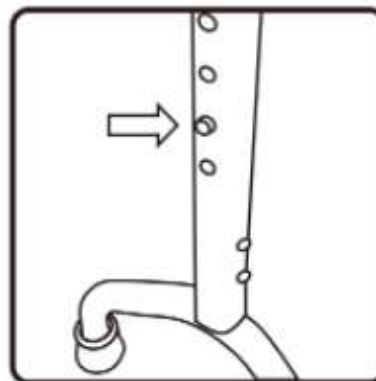

杖の高さを調整するには

1. 高さ調節押しボタンを押して、穴に合うように左右に脚を動かします。
2. 自分の身長に合うように脚を動かし、高さ調節押しボタンを各穴に入れる。
3. 回転部品を回し固定します。



脚の短い方を利用者側に

RSCを使用する際には、脚の短い方を自分側に向けて使用するようにしてください。

保証書

保証内容は、本体構造部の修理・交換となります。
本保証書とともに、型番が記載されている配送伝票も保管してください。

型番	配送伝票に記載	ご購入日	配送伝票に記載の出荷日
保証期間	ご購入日から1年間	販売店	Premium Lab TEL. 0745-69-2235
お客様	ご住所:	製品に不具合が生じた場合は、販売店にご連絡ください。 保証期間内であれば、無償で修理・部品交換を行います。 なお、購入日や販売店の署名などで保証が認められていない場合は、ご容赦ください。 保証書に購入日や販売店の署名がない場合は、保証の対象外となりますのでご了承ください。	
	お名前:		
	電話番号:		

保証期間内であっても、以下のような場合は保証対象外となります。

- ・取扱説明書に記載されている正しい使用方法やメンテナンスを行わなかった場合。
- ・杖先のゴム部分とグリップ部分は、補償対象外となります。有償での交換となります。
- ・純正部品を使用していない。
- ・事故、誤用などにより製品が破損している場合。
- ・お客様ご自身で修理や部品交換をされた場合。

P.3