


ORANGE +

Premium Lab

SAC(階段アシスト杖)

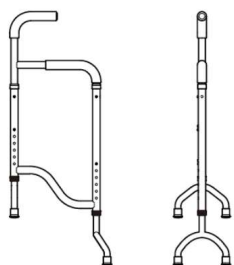

上記のQRコードから
動画マニュアルにアクセス可能です。

お問い合わせ

製造元会社名: Orange Living Co., Ltd.
日本総代理店: Premium Lab(プレミアムラボ)
住所: 奈良県葛城市南道穂42番地2
電話番号: 0745-69-2235

※電話が繋がりにくい場合がございますので、
メールにてご連絡ください。

メールアドレス: info@premium-lab.net
営業時間: 9:00~17:00(土日祝除く)

寸法: 365×215×963-1106mm

推奨ユーザー身長: 148~177cm

製品重量: 1.1kg

高さ調整: 12段階※追加で各段階の微調整が可能

耐荷重: 136kg

本体素材: アルミニウム合金

製品パーツ


箱の中には、下記のパーツが入っています。

- A : 杖のグリップ部分
- B : 杖の胴体部分
- C : 前脚(短い方)
- D : 後脚(長い方・脚部が湾曲)
- E : 回転部品

組み立て方法

Eの回転部品がBの両側に取り付けられていることを確認します。

1. Aについているボタンを押しながらBに挿入し、ボタンが飛び出して固定されることを確認します。
2. 右図のように、Cの脚を前脚として、D(湾曲した脚)を後脚として、それぞれBに挿入します。
3. 高さ調整押しボタンを押しながら高さを調整し、ボタンが飛び出したら、Eの回転部品を回してしっかり固定します。

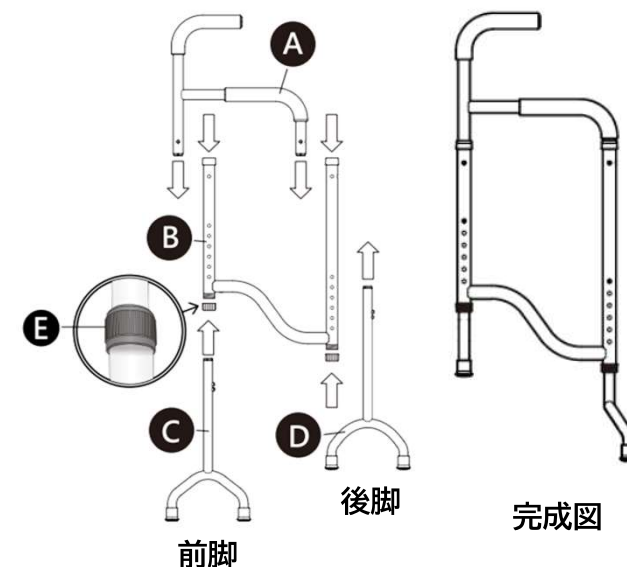

※前脚と後脚は、逆に組み立てないように注意してください。


※本製品は、階段専用の杖となります。平地では、歩行アシスト杖をご利用ください。

使用前の準備・調整


使用するのに適した高さは、(利用者の身長÷2) + 2cm
が目安となります。

杖を使うときは、杖を体の前に20cm離し、
肘の角度は30~40度くらいにします。

杖の高さや肘の角度は目安となりますので、
ご利用者様のお体や階段の高さに合わせてご利用ください。

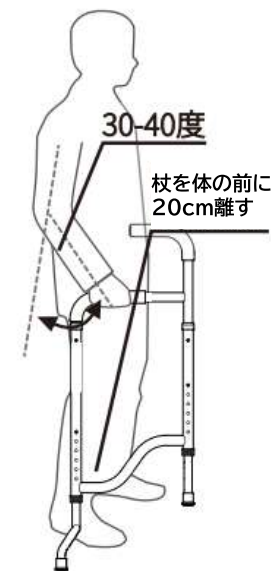

使用位置

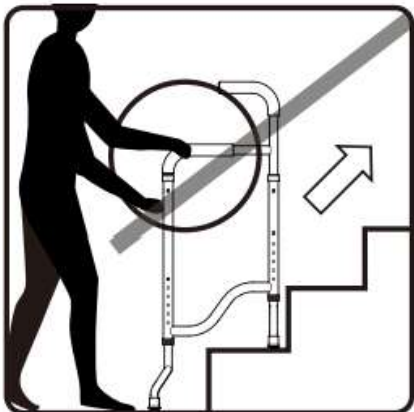

階段の上りに使う

1. 杖を階段に置いて、杖の高さが適切か、4本の脚が安定しているかを確認します。
2. 片手を階段の手すりに置き、もう片方の手を杖のハンドグリップに置きます(図の丸い部分)。
3. 杖が地面につき、体をしっかりと支えることができることを確認し、上の段に上がります。




階段の下りに使う

1. 杖を階段に置いて(足より一歩進んで)、杖の高さが適切かどうか、4本の脚が安定しているかどうかを確認します。
2. 片手を階段の手すりに置き、もう片方の手を杖のハンドグリップ(図の丸い部分)に置きます。
3. 杖が地面につき、体をしっかりと支えることができることを確認し、下の段に下がります。

メンテナンスと注意


- お体の状態に合わせて、医師、理学療法士、専門家等に相談の上ご利用ください。
- 杖を使用する前に、高さ調節押しボタンが杖にしっかりと固定されていることを確認してください。
- 高さ調節押しボタンが使用できなくなったり、緩んだり、壊れた際は、検査とメンテナンスのために日本総代理店に連絡してください。
- 利用者がきちんとした場所を歩いていることを確認すること。また薄暗い場所や滑りやすい場所での杖の使用は避けてください。
- 用途以外(例:登山用、トレッキングポール、護身用など)には使用しないこと。
- 前脚(短い方)と後脚(長い方・脚部が湾曲)について、前脚と後脚を逆につけるとフラットな状態となり段差がない場所に置くことができます。しかし、前脚と後脚を逆につけると下部が細い状態となり危険です。本説明書に記載の通り正しく組み立ててください。
- 使用前に、ゴムやネジが変形していないか、壊れていないかを確認し、壊れている場合は、安全性を保つために新しいものと交換が必要です。
- 杖で強い打撃(コンクリートをたたくなど)を与えないでください。
- 杖先ゴムは消耗品です。杖先ゴムの耐久度は、利用者、歩行条件、床面・路面等により変化します。磨耗して底面の溝が浅くなったり、割れ・欠けが発生している場合は、正しいサイズの新しい杖先ゴムと交換してください。杖先ゴムの交換は4個同時に交換してください。(杖先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。4個同時に交換しないとガタつきの原因となります。)
- 杖は涼しくて乾燥した場所に置いてください。ストーブのそばや強い日差しの下にある車の中など、高温の環境に置くことはさけてください。

使用方法

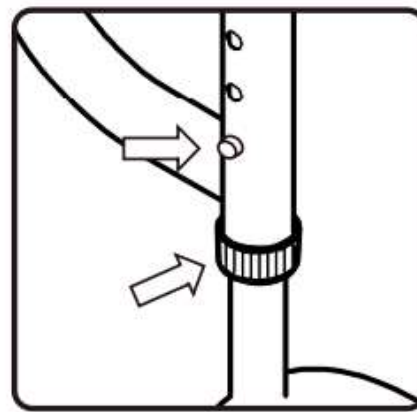

杖の高さを調整するには

1. 上の矢印のボタンを押し、脚を適切な高さに動かし、ボタンがポップアップして固定されるまで、脚を動かします。
2. 下の矢印の回転部品を締め付けられるまで回転させ固定させます。

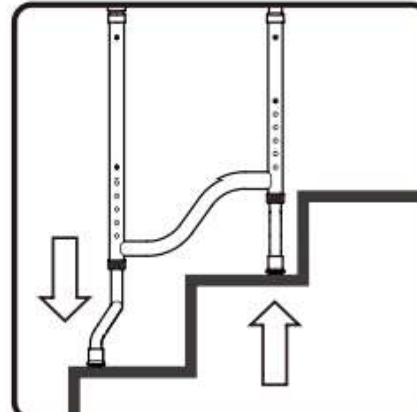

杖の高さを階段の高さに合わせるには

1. 階段の上に杖を置きます。下段のボタンを押して、適切な高さに調節してください。その後、高い方の脚のボタンを押して、杖の安定性を調整します。
2. ボタンがポップアップして固定されるまで、脚を適切な高さに動かしてください。
3. 杖を持って動かして、階段で安定しているかどうかを確認します。安定した状態で回転する部品をきつくなるまで回転させてください。

保証書

保証内容は、本体構造部の修理・交換となります。
本保証書とともに、型番が記載されている配送伝票も保管してください。

型番	配送伝票に記載	ご購入日	配送伝票に記載の出荷日
保証期間	ご購入日から1年間	販売店	Premium Lab TEL. 0745-69-2235
お客様	ご住所:	製品に不具合が生じた場合は、販売店にご連絡ください。 保証期間内であれば、無償で修理・部品交換を行います。 なお、購入日や販売店の署名などで保証が認められていない場合は、ご容赦ください。 保証書に購入日や販売店の署名がない場合は、保証の対象外となりますのでご了承ください。	
	お名前:		
	電話番号:		

- 保証期間内であっても、以下のような場合は保証対象外となります。
- ・取扱説明書に記載されている正しい使用方法やメンテナンスを行わなかった場合。
 - ・杖先のゴム部分とグリップ部分は、補償対象外となります。有償での交換となります。
 - ・純正部品を使用していない。
 - ・事故、誤用などにより製品が破損している場合。
 - ・お客様ご自身で修理や部品交換をされた場合。