


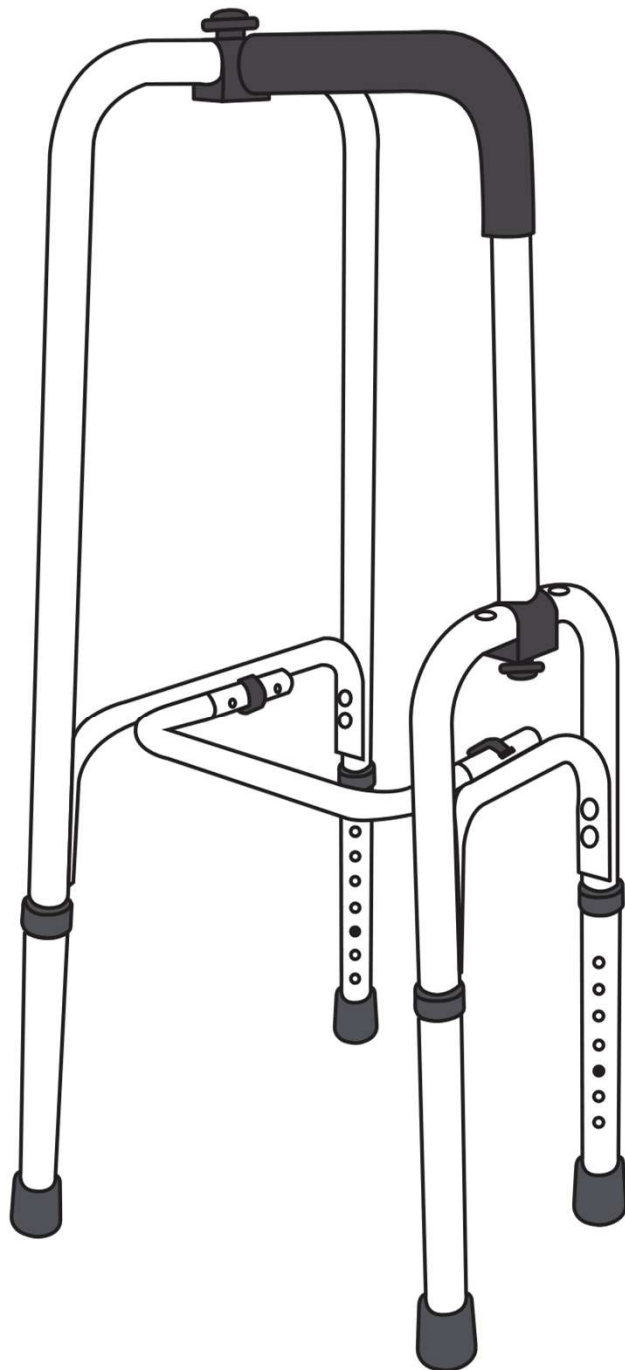

STROKE CANE


取扱説明書



組立方法の動画は、こちらのQRコードを読み込み閲覧してください。
組立方法の動画と合わせて、本取扱説明書をご確認くださいませ。


製品パーツ

A

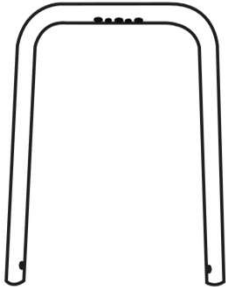


大型サイドパイプ
(上)×1

B

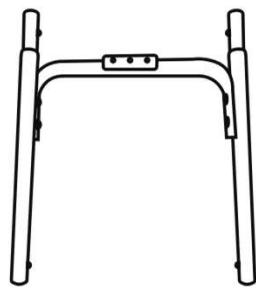


大型サイドパイプ
(下)×1

C

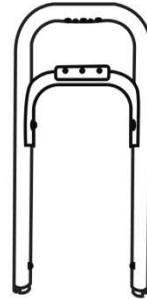


小型サイドパイプ
×1

D

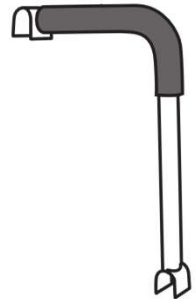


持ち手パイプ×1

E

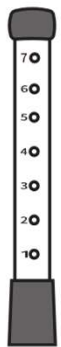

脚×4

F

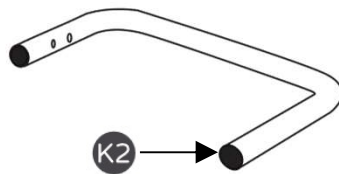

接続パイプ×1

G1



ノブボルト×1(短)

G2




ノブボルト×1(長)

H



E型クリップ×3
(予備×1含む)

I

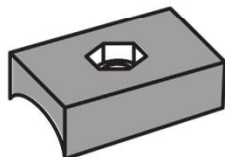

プラスチック
バックル×2

J



ナット×2
(予備×1含む)

K1



キャップ大×3
(予備×1含む)


K2




キャップ小×1
(予備)

取り付け方法


製品には分類しやすいように丸い色のシールが付属しており、組み立ての際には同じ色を合わせます

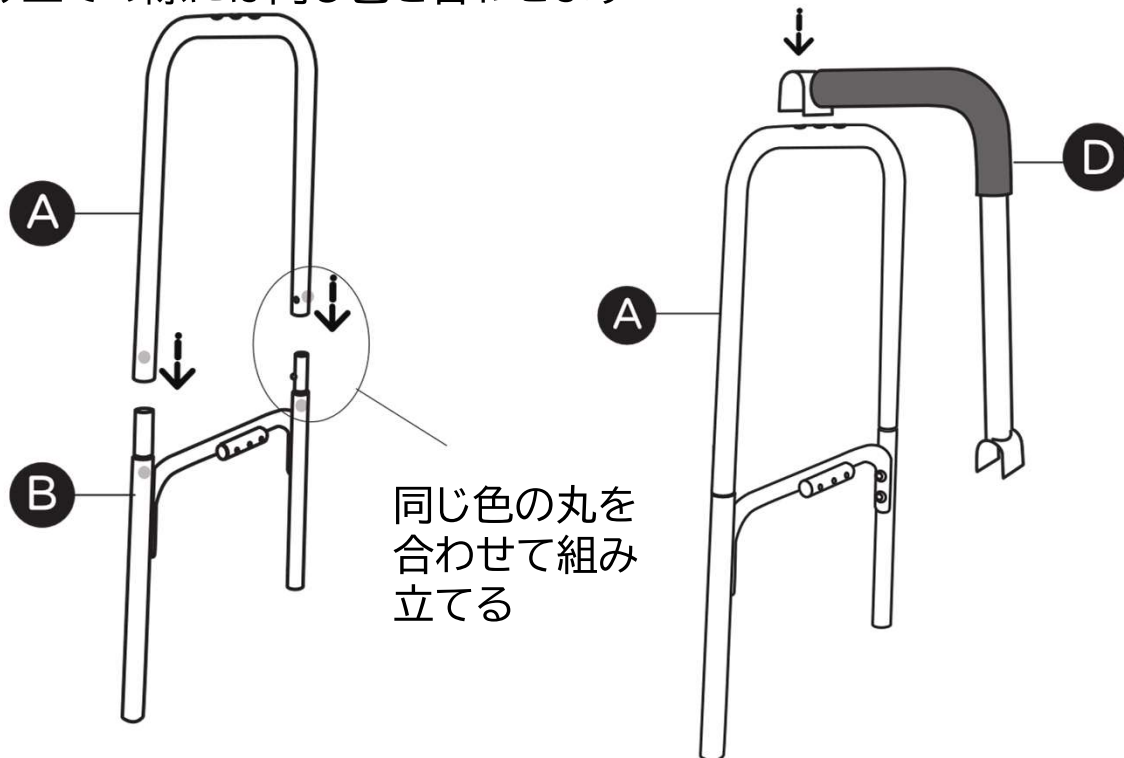


- ① 図のようにAとBを組み立てます。 ② 図のようにAとDを組み立てます。

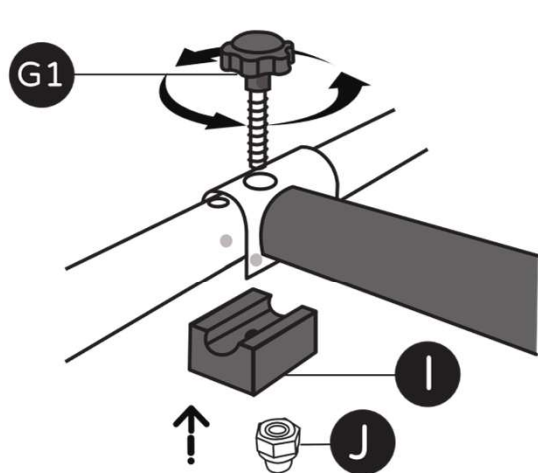


- ③ 図のようにIとJを組み、**G1**で仮止めします。

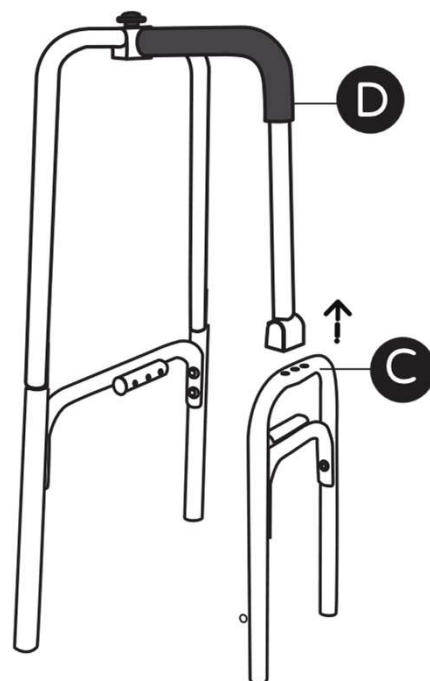


- ④ 図のようにCとDを組み立てます。

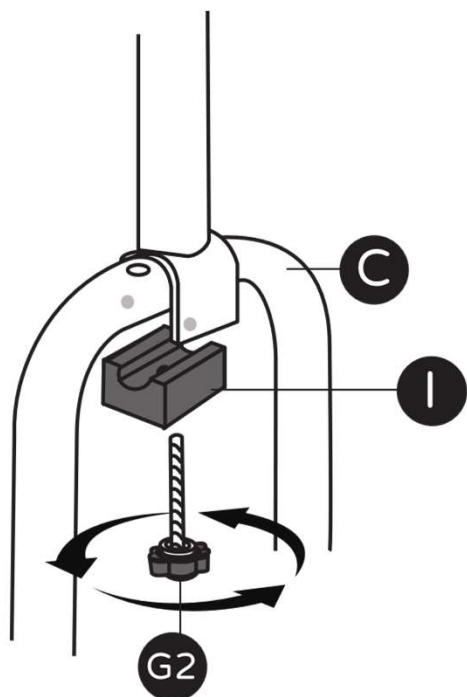

⑤ 図のようにCの上部にある中央の穴に合わせて**G2をIの穴に挿入し仮止めします。**

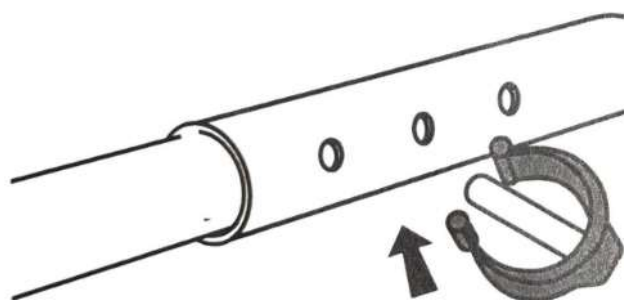


⑦ 図のように、E型クリップを差し込み固定します。

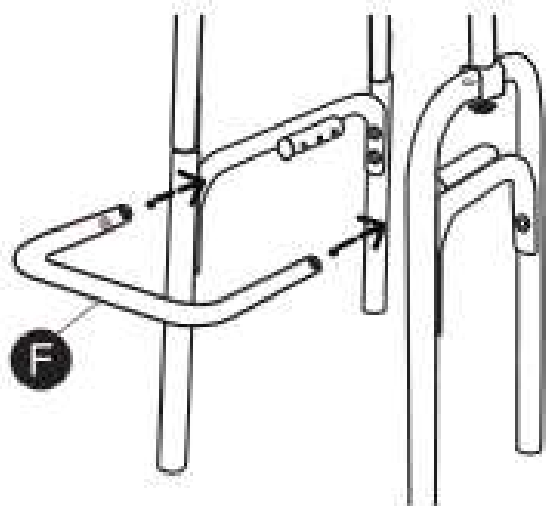

⑥ 図のようにFをパイプに挿入します。

注意

Fには、奥行き調整用の穴が2つあります。左右で交互にならないように注意し、組み立ててください。


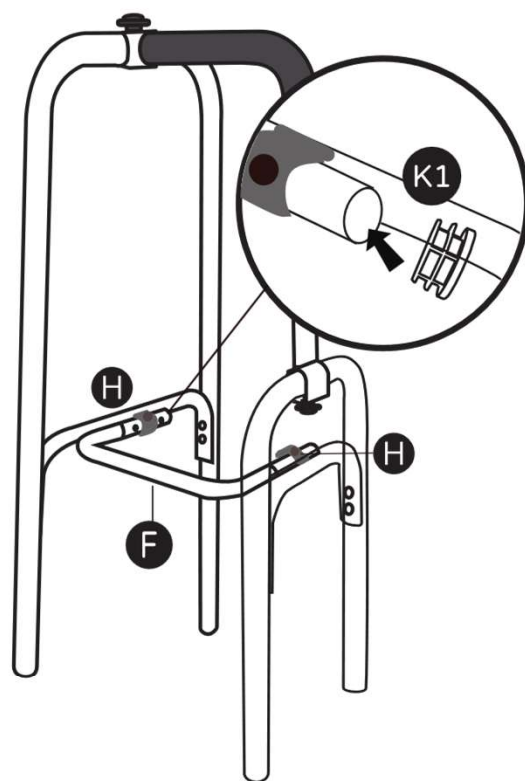


⑧ 設置完了後、Fが丸パイプの先端を超えない場合、K1を丸パイプの両端に挿入し、保護してください。

⑨ 図のようにEを本体に挿入します。


身長に合うように高さ調整押しボタンの位置を合わせます。

持ち手が手首の位置にくるように高さを調整してください。

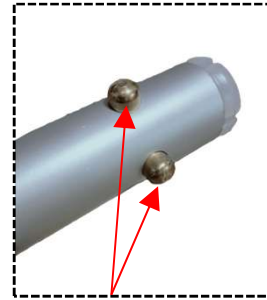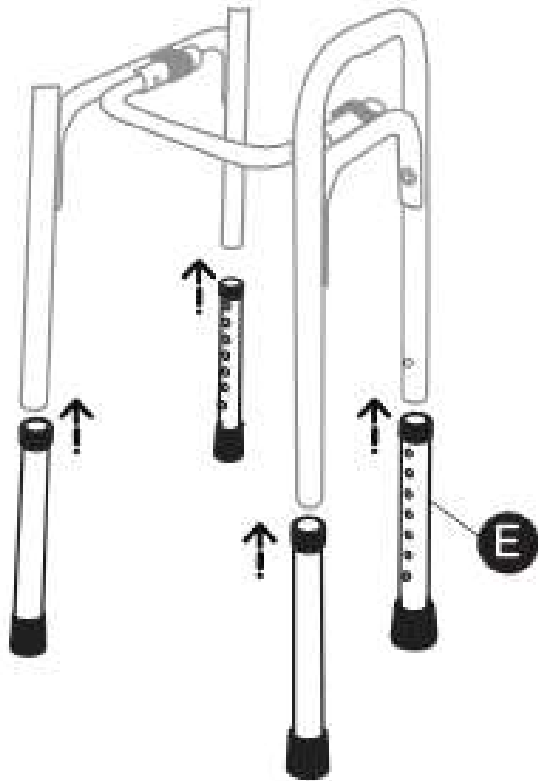

高さ調整押しボタンは、2か所にあります。どちらのボタンが穴から飛び出しても問題ありません。


4本の脚すべてが同じ番号の穴に揃うように、高さ調整押しボタンのボタン(ロックピン)を押しながら調整してください。

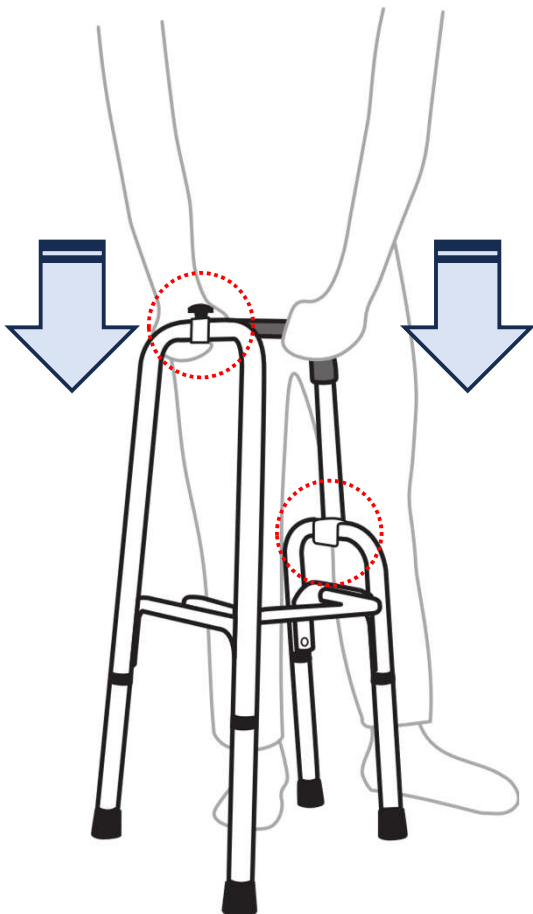

⑩ ①～⑨の組み立てが完了した後、上から下方方向に力を加えて、ゆがみを調整します。


仮止めていた、G1とG2を締めます。

右手用の調整

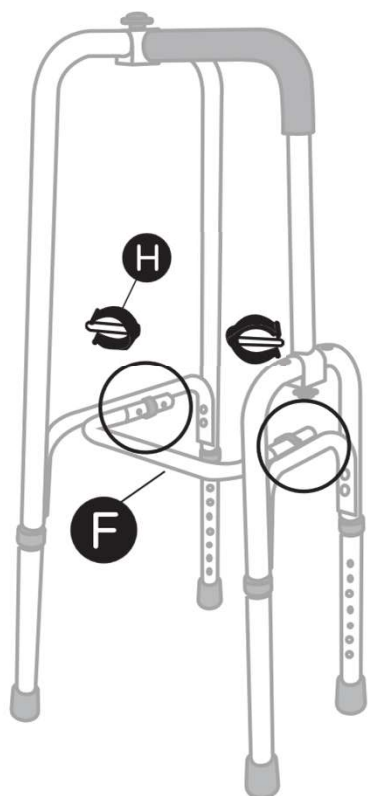


HのE型クリップ2個を外し、
Fの接続パイプを外す。

左手用の調整

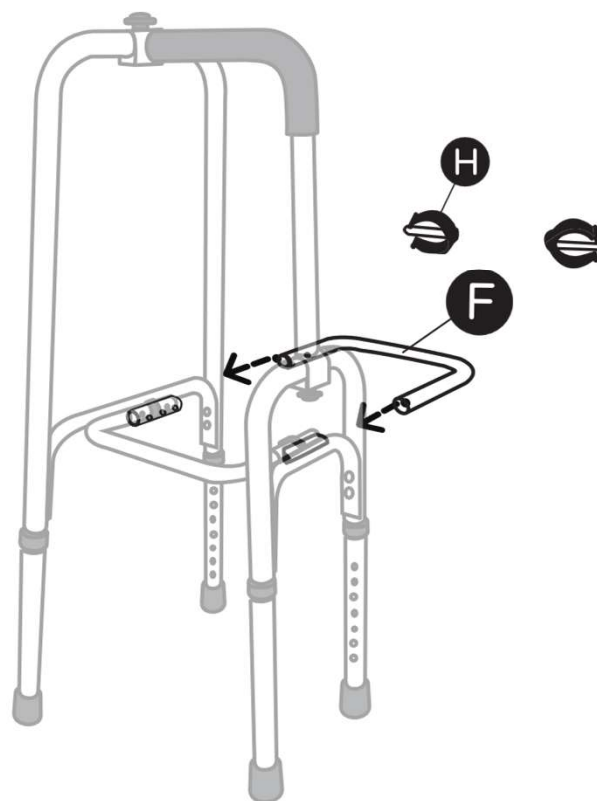

反対側からFの接続パイプを
挿入し、HのE型クリップで固定
します。


奥行き調整

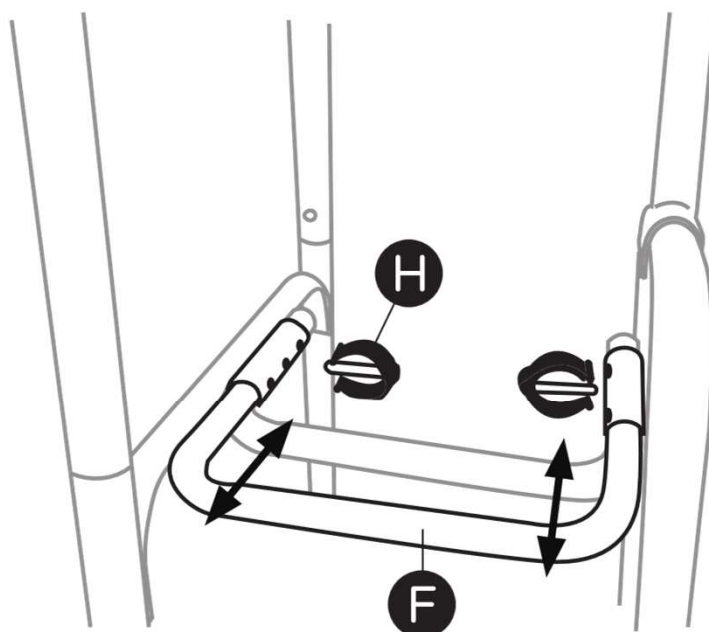

両側のE型クリップ2個を外し、接続パイプFを希望の奥行きに調整し、
E字クリップを再度挿入して固定します。

前方で使用する場合

健側の手でStroke Caneをもち、図のようにの短い側を両足の間に置きます。


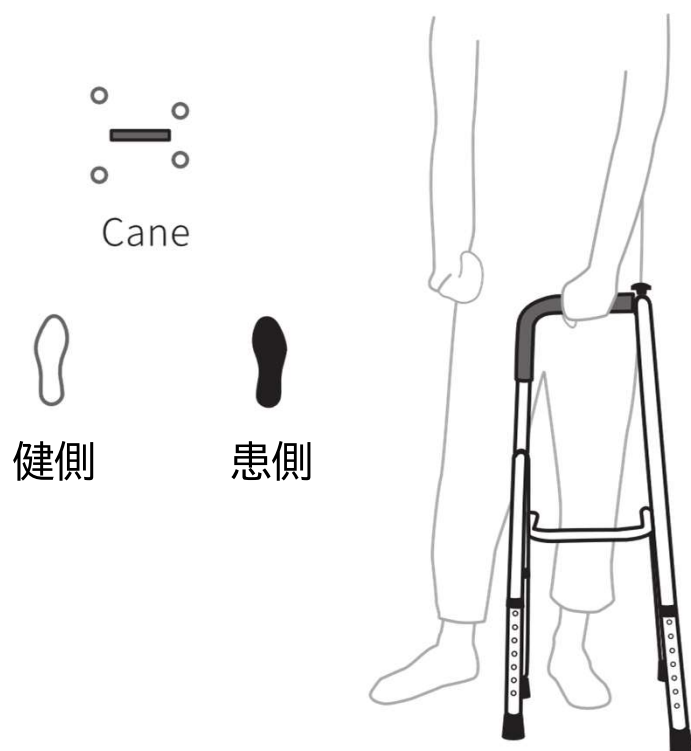


4.1～4を繰り返します。



サイドで使用する場合


健側の手でStroke Caneをもち、幅の広い方を前にする。
(使い方は4本杖と同じ。)

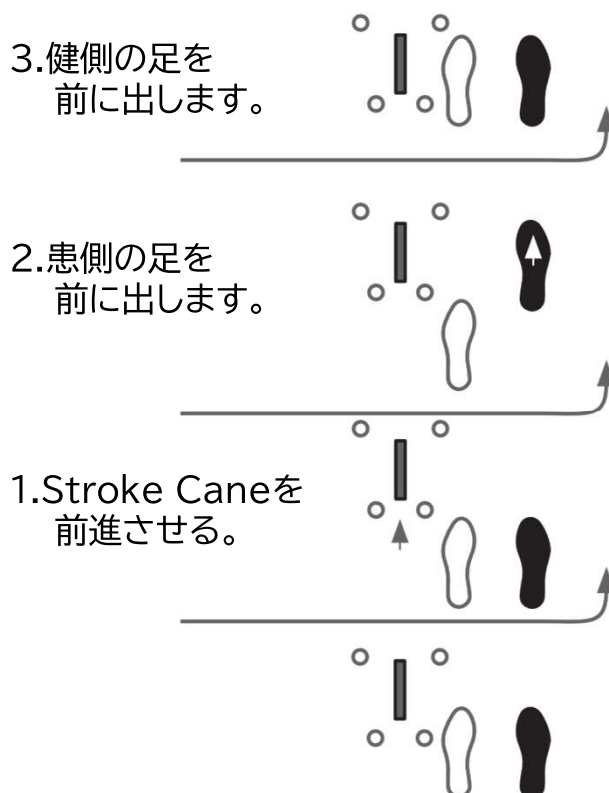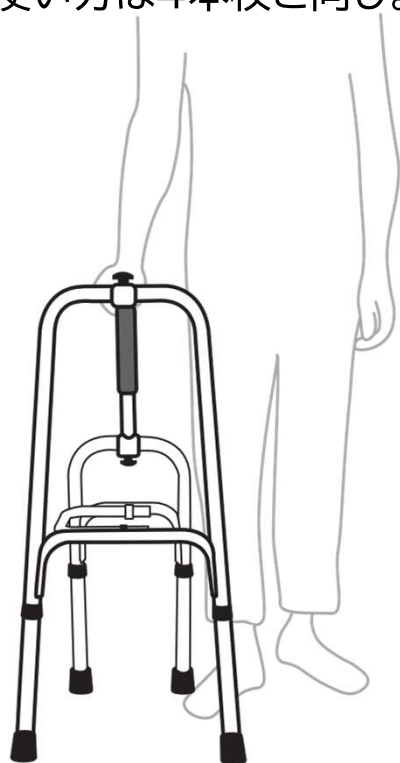


両手で持って使用する場合

Stroke Caneを健側の前に置く。


図のように、短い方を足の間に挟み、ハンドルを体の方に45度回転させます。

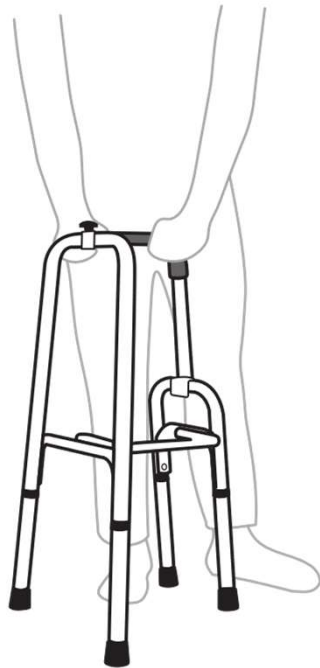


3.患側の足を
前に出します。

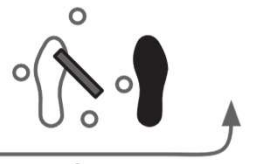


2.健側の足を
前に出します。

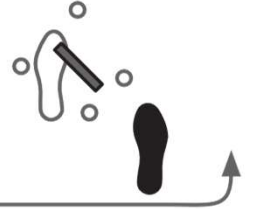


1.Stroke Caneを
前進させる。

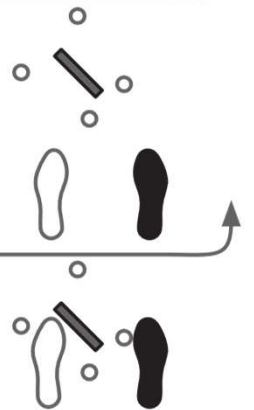


立ち上がりで使用する場合

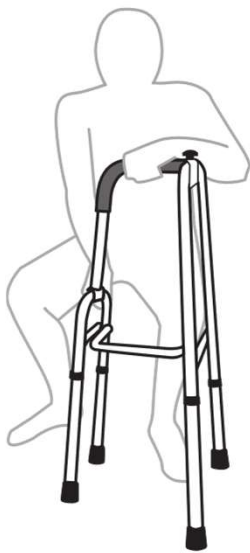

1
Stroke Caneを健側
の足の方に置き、でき
るだけ体に近づけます。

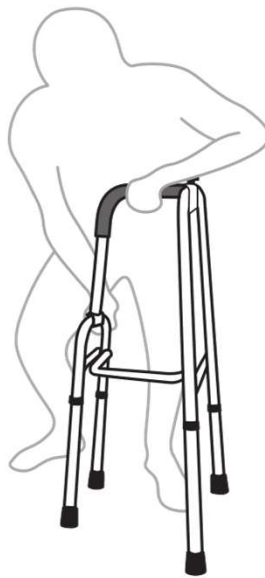


2
片手で短い方を持ち、
もう片方の手でハンド
ルを握り支えます。

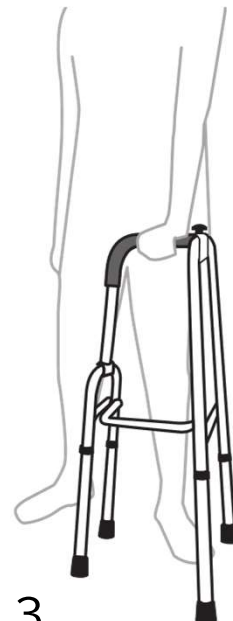


3
ハンドルを握っている
手で下向きの力をかけ、
ゆっくりと立ち上がり
ます。

別売りの車輪について

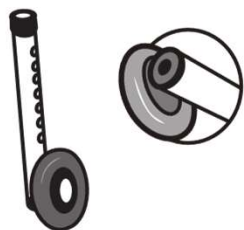

車輪 黒色の底シール x1

前方で使用する場合

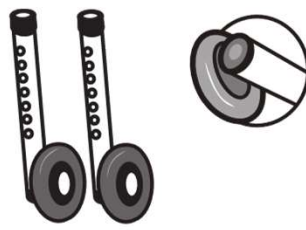

車輪 灰色の底シール x2

サイドで使用する場合



車輪について

前面で使用する場合と側面で使用する場合で、車輪の色を変更して利用してください。

清掃とメンテナンス

- 乾いた布などを使用して拭いてください。
- 使用後や保管時は、本製品が乾燥していることを確認してください。
- 保管する際は、清潔で乾燥した場所に置いてください。
- 使用前に、本製品に変形や高さのズレがないことを確認してください。
- 使用前に、部品の緩みや破損がないか、また杖先ゴムにひび割れや損傷がないかを点検してください。
- 使用中は、異音がなくスムーズに動作することを確認してください。



注意事項とご使用時のお願い

- お体の状態に合わせて医師、理学療法士、専門家等に相談の上ご利用ください。
- 初めて使用する際は、安全のため付き添いの方と一緒にご使用ください。
- ご使用の際は、足にフィットし滑りにくい靴を着用してください。履物を変えたことで高さに違いが生じる場合は、使用前に高さを調整してください。
- 快適かつ安全に使用するため、ご自身に最適な高さに調整してからお使いください。
- 製品のフレームに座ったり、もたれかかったりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本製品は平坦な場所で使用し、凹凸のある場所では使用を避けてください。また、滑りやすい場所、暗所、障害物のある場所での使用は避け、転倒や事故を防止してください。
- 本製品は階段の昇降には対応していません。
- 杖先ゴムやハンドルなどの消耗部品が著しく摩耗した場合は、販売店にて点検・交換を行い、安全を確保してください。
- 本製品で強い打撃(コンクリートをたたくなど)を与えないでください。

製品保証について

- 本製品には、購入日から12か月の保証が付いています。保証期間中は、製造上の欠陥による部品の修理や交換を無料で対応いたします。保証の詳細は以下のとおりです。
- 修理や交換が必要な場合や製品に不具合が生じた場合は、販売店にご連絡ください。
- 保証期間内の修理および部品交換は無料で対応いたします。(ただし、ハンドルや杖先ゴムなどの消耗品は保証対象外です。)
- 修理や部品交換後の保証期間は、購入時の保証期間に準じます。
- 以下の場合、保証の対象外となる可能性がありますのでご注意ください。
 - a) 製造元の推奨する使用方法およびメンテナンス方法に従わなかった場合。
 - b) メーカー純正品以外の部品を使用した場合。
 - c) 不注意、事故、誤使用による損傷が発生した場合。
 - d) ご利用者自身による修理や部品交換を行った場合。
- 本マニュアルに記載されている数値や仕様は参考値であり、特定の性能を保証するものではありません。
- 品質向上を目的に製品のデザイン・仕様が予告なく変更になる可能性があります。

製品の特長

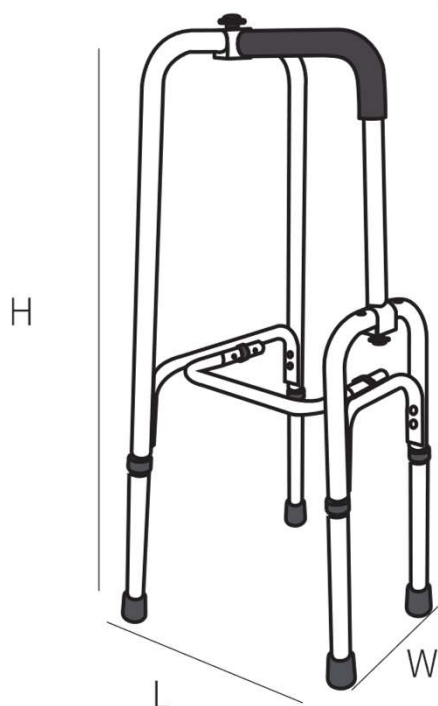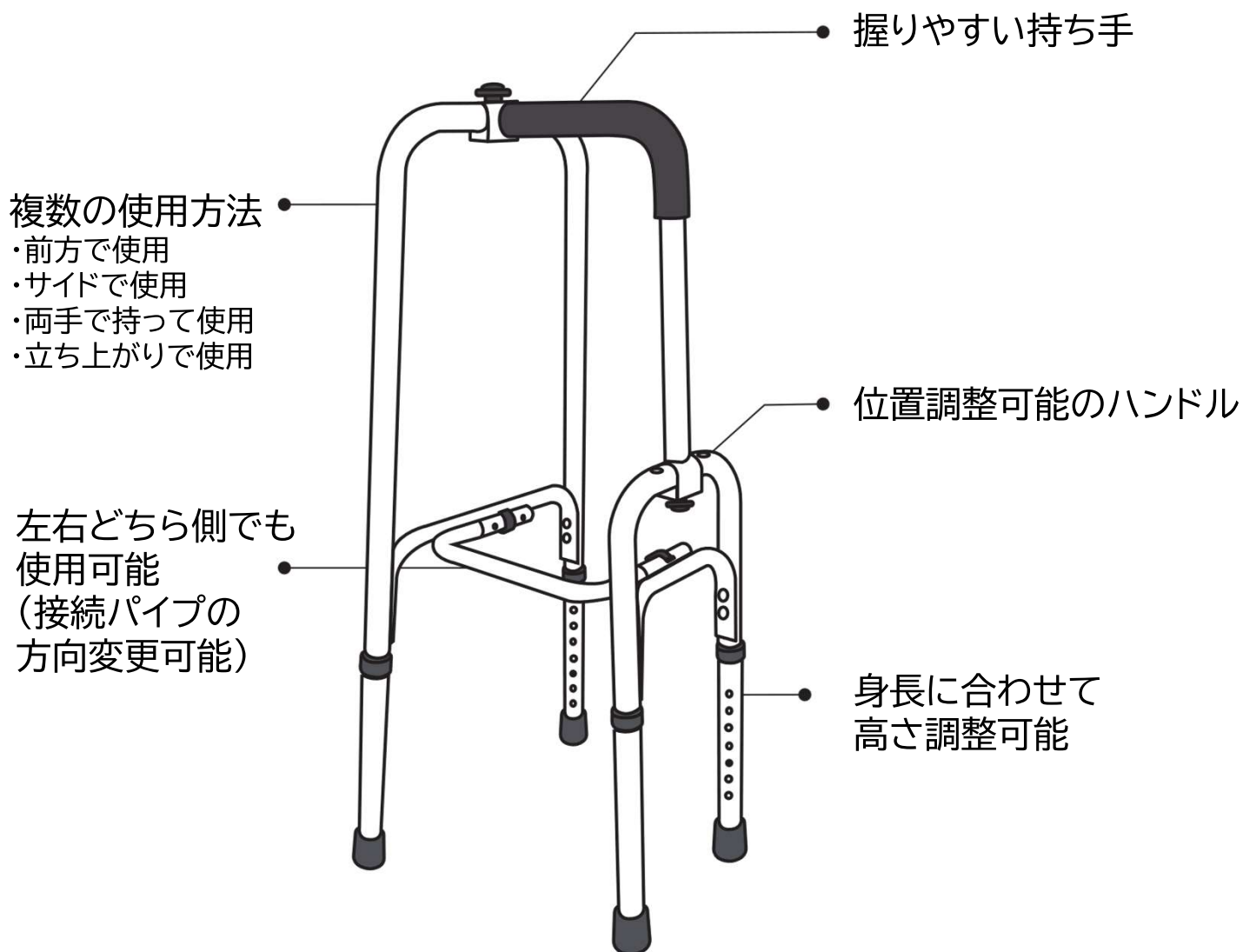

寸法:L377×W377×H(707 - 858)mm

製品重量:1.6kg

高さ調整:7段階

耐荷重:158kg

本体素材:アルミニウム合金

ORANGE +



お問い合わせ

製造元会社名: Orange Living Co., Ltd.

日本総代理店: Premium Lab

住所: 奈良県葛城市南道穂42番地2

電話番号: 0745-69-2235

※電話がつながりにくい場合がございますので、メールにてご連絡ください。

メールアドレス: info@premium-lab.net

営業時間: 9:00~17:00(土日祝除く)