

コンパクトアシスト杖 Rock Cane Roll

仕様

寸法: 225×220×(775 - 890)mm
 推奨ユーザー身長: 150-174cm
 製品重量: 750g
 高さ調整: 775 - 890mm(前24段階、後10段階)
 耐荷重: 115kg
 本体素材: アルミニウム合金

製品パーツ

箱を開けると、3つの部品が入っています。
 A: 杖本体
 BとC: 杖の足
 a: 回転部品とプラスチックのリング(わっかのようモノ)
 ※別途、付属のバッグが同梱されています。


組み立て方法

a.の部品を本体のそれぞれの足に付け、BとCをAに差し込みます。回転部品の内部にあるプラスチックリングは、隙間を埋めて、しっかりと固定する役割があります。

1. 両足の穴と高さ調整押しボタンを合わせてください。
2. 回転部品を回して固定する。

使用前の準備・調整

使用するのに適した高さは、
 (ユーザーの身長÷2) + 2cm が目安となります。
 杖を使うときは、杖を体の前に20cm離し、肘の角度は30～40度くらいにします。


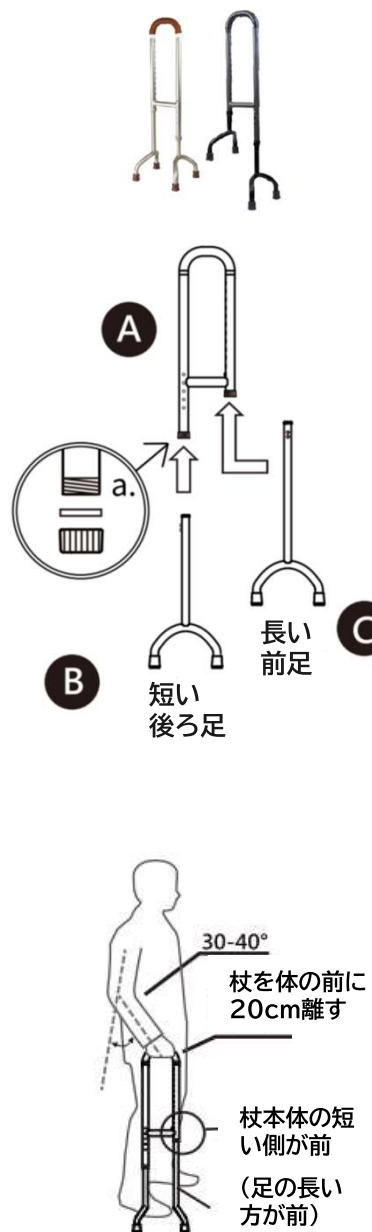


ユーザーの身長と杖の高さ対応表(cm)

ユーザーの身長	～150	155	160	165	170～
対応番号	08	09	10	11	12

※対応番号は参考としてください。お体の状態に合わせて、
 またご利用環境(平地、階段)に合わせて前足と後足を適切な位置に合わせてご利用ください。
 ※150cm以下、170cm以上の方もご利用いただけます。

高さを調整について

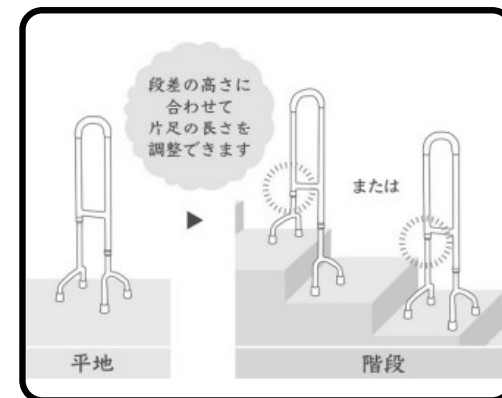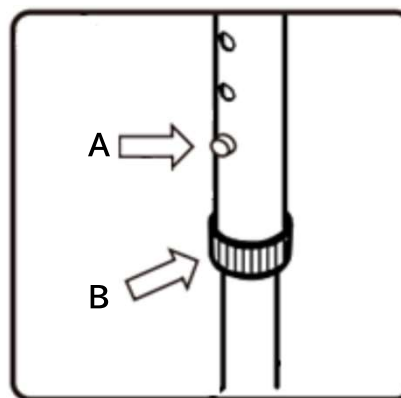

Aの高さ調整押しボタンを押して、足の高さを適切に調整します。高さ調整押しボタンは、前足と後ろ足にそれぞれ2個ずつあり、高さを微調整することが可能です。高さ調整押しボタンがポップアップして適切な高さになったことを確認してから、Bの回転部品を締め付けて固定します。

平地で利用する場合は、前足と後ろ足の高さが同じ高さになっており、地面(床)と手すり部分が平行になっていることを目視で確認してください。

階段で利用する場合は、段差に応じて前足と後ろ足を適切に高さを調整してください。

杖の足の4点が地面(床)や段差に安定して設置していることを確認しご利用ください。

ユーザーガイド


平地での歩行に使う

- 1. 一般的な4点杖として使用することができます。
- 2. 両手でつかむことができ、上半身の体重を支えることができるデザインです。
- 3. 上半身の体重を支えることができます。短い休憩時には、両手をハンドルに置くことで、簡単に下半身にかかる負担を軽減することができます。



立ち上がりを使う

- 1. 杖を体の前に置く。
- 2. 片手または両手をハンドルに添えて、体を起こすのを助ける、支えることができます。
- 3. ソファやトイレ、ベッドからの立ち上がりは、両手で押し下げることによって補助します。

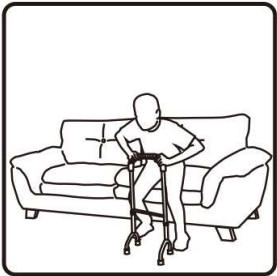

階段の上りに使う

- 1. 杖を階段に置いて、杖の高さが適切か、4本の脚が安定しているかを確認します。
- 2. 片手を階段の固定手すりに置き、もう片方の手を杖に置きます。
- 3. 杖が地面につき両足が安定し、体をしっかりと支えることができることを確認し、上の段に上がります。



階段の下りに使う

- 1. 杖を階段に置いて(足より一歩進んで)、杖の高さが適切かどうか、4本の足が安定しているかどうかを確認します。
- 2. 片手を階段の固定手すりに置き、もう片方の手を杖に置きます。
- 3. 杖が地面につき両足が安定し、体をしっかりと支えることができることを確認し、下の段に下がります。



安全にお使いになるためのご注意

- お体の状態に合わせて、医師、理学療法士、専門家等に相談の上ご利用ください。
- 杖を使用する前に、ボタンが杖にしっかりと固定されていることを確認してください。
- 高さ調整押しボタンが使用できなくなったり、緩んだり、壊れた際は、検査とメンテナンスのために製品を日本総代理店に送り返してください。
- ユーザーがきちんとした場所を歩いていることを確認すること。また薄暗い場所や滑りやすい場所での杖の使用は避けてください。
- 用途以外(例:登山用、トレッキングポール、護身用など)には使用しないこと。
- 使用前に、ゴムやネジが変形していないか、壊れていないかを確認し、壊れている場合は、安全性を保つために新しいものと交換してください。
- 先ゴムは消耗品です。先ゴムの耐久度は、利用者、歩行条件、床面・路面等により変化します。磨耗して底面の溝が浅くなったり、割れ・欠けが発生している場合は、正しいサイズの新しい先ゴムと交換してください。先ゴムの交換は4個同時に交換してください。(先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。4個同時に交換しないとガタつきの原因となります。)
- 杖は涼しくて乾燥した場所に置いてください。ストーブのそばや強い日差しの下にある車の中など、高温の環境に置くことは禁じられています。

お問い合わせ

製造元会社名:Orange Living Co., Ltd.
日本総代理店: Premium Lab
住所:奈良県葛城市南道穂42番地2
電話番号:0745-69-2235
※新型コロナウイルスの影響により、電話が繋がりにくい場合がございますので、メールにてご連絡ください。
メールアドレス:info@premium-lab.net
営業時間:9:00~17:00(土日祝除く)



保証書

保証内容は、本体構造部の修理・交換となります。
本保証書とともに、型番が記載されている配送伝票も保管してください。

型番	配送伝票に記載	ご購入日	配送伝票に記載の出荷日
保証期間	ご購入日から1年間	販売店	Premium Lab TEL. 0745-69-2235
お客様	ご住所:	製品に不具合が生じた場合は、販売店にご連絡ください。 保証期間内であれば、無償で修理・部品交換を行います。 なお、購入日や販売店の署名などで保証が認められていない場合は、ご容赦ください。 保証書に購入日や販売店の署名がない場合は、保証の対象外となりますのでご了承ください。	
	お名前:		
	電話番号:		

保証期間内であっても、以下のような場合は保証対象外となります。
・取扱説明書に記載されている正しい使用方法やメンテナンスを行わなかった場合。
・杖先のゴム部分とグリップ部分は、補償対象外となります。有償での交換となります。
・純正部品を使用していない。
・事故、誤用などにより製品が破損している場合。
・お客様ご自身で修理や部品交換をされた場合。